

DCL 脱蠟・重合用機器

# MIS セミオートデンチャーシステム



- ・脱蠟、レジン重合のための半自動機です。
- ・脱蠟（ワックス洗浄・分離剤塗布・脱泡処理含む）の1サイクルを約30～40分で行えます。
- ・フラスコやルツボ等の消耗品は MIS-II/III plus と共通で使用可能です。




## 《特徴》

- ・これ1台で、ワックス洗浄・分離剤塗布・レジンの重合処理まで行えます。
- ・ワックス軟化・洗浄・分離剤塗布・脱泡を自動実行。
- ・ポイラー及び水槽の温度は1℃単位、ワックス軟化処理時間・重合時間は1秒単位で設定可。



操作パネルは白、黒の2色あり


## 《脱蠟手順》

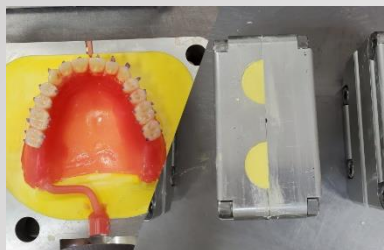

① 埋没まで済ませたフラスコを準備する。



② 機器の水槽にフラスコを入れる。

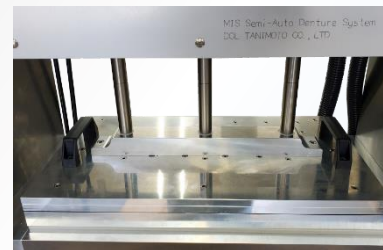

③ フタをしてプランジャーを降ろす。



④ 機械の脱蠟操作を開始する。



⑤ ワックス洗浄が終わったら、フラスコの空冷・乾燥。



⑥ 続いて自動で分離剤塗布。



⑦ 最後に自動で脱泡処理。



所要時間は約30～40分です。

- ・脱蠟モードでは、たった2回のボタン操作だけで脱泡まで自動実行します。
- ・自動実行完了時には、音とランプで知らせます。
- ・手動モードでは、「ワックス洗浄」「分離剤塗布」等の所望工程のみの実行が可能です。


## 《重合手順》



- ① レジンを填入したいフラスコを水槽にセットする。



- ② レジンを装填したルツボを置いて填入操作する。

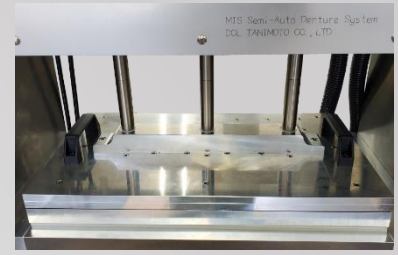

- ③ 保圧パッキンをはさんで、水槽のフタをする。



- ④ 重合処理を開始



- ⑤ 設定した時間が経過したら重合完了。

・重合完了時には、音とランプで知らせます。

## 《消耗品／付帯品》



フラスコ



ダミーフラスコ



ルツボ (\*MIS-III plus 用ルツボ (上) 同等)



重合用ルツボ装着治具



レジン治具



分離剤ポット



SAD 用保圧パッキン



水槽フタ用シリコンゴムパッキン



フラスコ取出し用プライヤ



押棒



清掃用プラスチック治具



六角レンチ (フラスコ開輪用)

## 《標準セット内容》

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| ・本体 x1            | ・押棒 x1          |
| ・排水タンク x1         | ・清掃用プラスチック治具 x1 |
| ・フラスコ x6          | ・重合用ルツボ装着治具 x1  |
| ・ダミーフラスコ x2       | ・分離剤ポット x1      |
| ・ルツボ x6           | ・六角レンチ x1       |
| ・レジソ治具 x6         | ・プライヤ x1        |
| ・水槽フタ用シリコンパッキン x3 |                 |
| ・重合時専用保圧パッキン x6   |                 |

## 《本体仕様》

寸法： 幅 660 mm x 奥行 550 mm x 高さ 1470 mm  
重量： 120 kg  
使用電源： 単相 200V 30A  
使用空気圧： 0.8 MPa

※製品の仕様、外観およびセット内容は予告なく変更になる場合があります。

## 《お問合せ》

製品に関するお問い合わせは、お電話またはメールにて承ります。

【TEL】 0790-63-2788

【MAIL】 machine@dcltanimoto.com



製造販売業者

有限会社ディーシーエルタニモト

〒671-2533 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢 1283

TEL : 0790-63-2788 FAX : 0790-67-9090

URL : dcltanimoto.com

医療機器製造販売業 28B2X10028

医療機器製造業 28BZ200035