

DCL トリプルバレル研磨器

# トリプルバレル Neo




- ・従来の「トリプルバレル研磨器」に対し、高速化、高機能化、高剛性化しています。
- ・コンパクトな筐体で場所を取りません。
- ・ステンレスのシャーシとアルミ製カバーなので錆の心配がありません。



## 《特徴》

- ・同時に3つの研磨ポットを装着するため、多くの補綴物が研磨できます。
- ・研磨速度は Low から High までの4段階切替。金属研磨用途とレジン研磨用途で速度切替がワンタッチで可能です。
- ・バレルの回転方向は従来の正転モードに加えて、3通りの反転モードを追加しました。

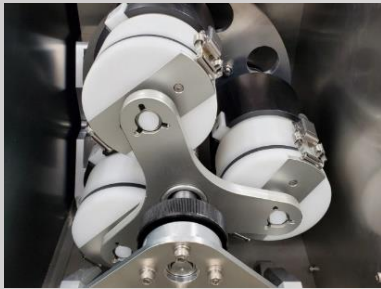

## 《使用手順》



- ① ポットに規定量の研磨メディアを入れる。



- ② コンパウンドをキャップ1杯分入れる。



- ③ 研磨したい補綴物を入れる。



- ④ 規定量の水を入れる。



- ⑤ フタをしてフックで固定。



- ⑥ ポットを本体に装着する。



- ⑦ ブーメランでポットを固定。



- ⑧ 速度と回転モード、研磨時間を設定。



- ⑨ START を押して研磨開始。

《メディアおよび消耗品》



金属用研磨メディア（粗）—黄白色—  
3 kg / 袋



コンパウンド（液）  
2 L / 瓶



金属用研磨メディア（中）—茶色—  
2 kg / 袋



コンパウンド（ペースト）  
100 g / ケース



レジン用研磨メディア（粗）—グレー—  
2.5 kg / 袋



ブーメラン Neo（研磨ポット固定治具）



レジン用研磨メディア（中）—水色—  
2 kg / 袋



ガイド針



仕上げ用研磨メディア（クルミ粉）  
1.5 kg / 袋



研磨ポット Neo

※フタピンを付け替えることで従来の研磨ポットも使用可能です。

## 《標準セット内容》

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| ・本体 x 1                 | ・レジン用研磨メディア (2.5kg/袋) x 1 |
| ・専用研磨ポット x 3            | ・中研磨用メディア (2kg/袋) x 1     |
| ・研磨ポット固定用治具 (ブーメラン) x 1 | ・クルミ粉 (1.5kg/袋) x 1       |
| ・清掃用ボウル x 1             | ・湿式用コンパウンド液 (2L/瓶) x 1    |
| ・ガイド針 x 1               | ・乾式用コンパウンド (100g/ケース) x 1 |
| ・金属研磨用メディア (3kg/袋) x 1  |                           |

## 《本体仕様》

寸法： 幅 475 mm x 奥行 440 mm x 高さ 340 mm

重量： 35 kg

使用電源：単相 100V 220W

※製品の仕様、外観およびセット内容は予告なく変更になる場合があります。

## 《お問合せ》

製品に関するお問い合わせは、お電話またはメールにて承ります。

【TEL】 0790-63-2788

【MAIL】 machine@dcltanimoto.com



製造販売業者

有限会社ディーシーエルタニモト

〒671-2533 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢 1283

TEL : 0790-63-2788 FAX : 0790-67-9090

URL : dcltanimoto.com

医療機器製造販売業 28B2X10028

医療機器製造業 28BZ200035